


# zonis®


Apósito antimicrobiano de alginato de plata para catéter




## Como Aplicarlo

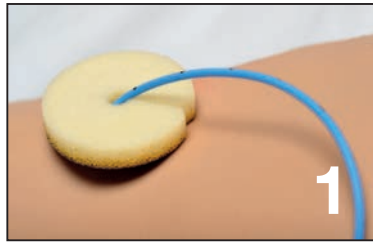

1. Alínea el disco antimicrobiano con el catéter, asegurándote que no lo toca y que rodea completamente el catéter con la parte clara hacia arriba.

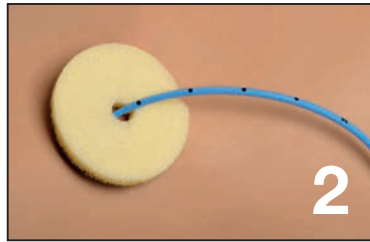

2. El disco antimicrobiano Zonis tiene que estar en contacto con la piel

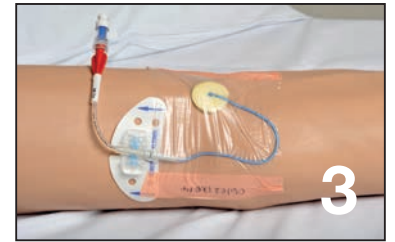


3. Fija el catéter y el disco a la piel con un apósito de plástico transparente. Asegúrate que el disco Zonis está en contacto con la piel

## Como Removerlo





1. Sujeta el catéter para prevenir su desprendimiento y despeja el apósito de plástico transparente

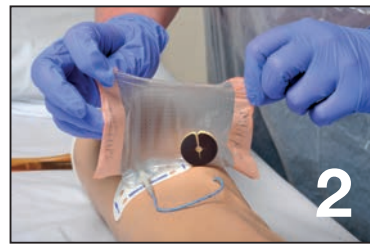



2. Retira con cuidado el disco antimicrobiano Zonis que está pegado al apósito de plástico transparente.





## Consejos y Sugerencias

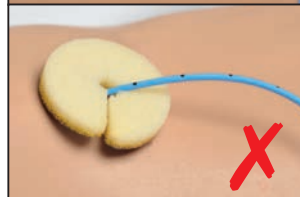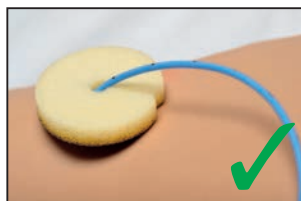

Alínea los bordes del disco con el catéter para facilitar su eliminación posterior.

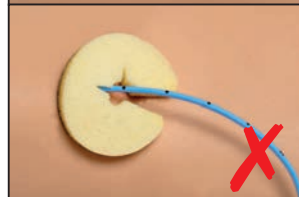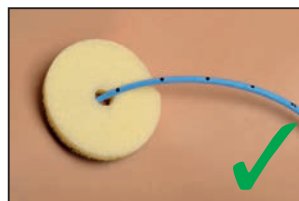

Siempre asegúrate que los bordes del disco Zonis se están tocando para obtener un protección de 360°.

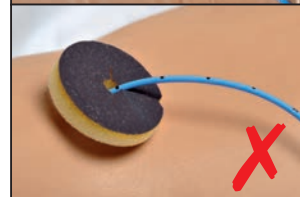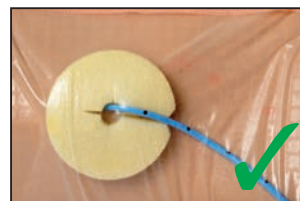

Siempre coloca el disco Zonis con la cara de color claro hacia arriba.



Siempre asegúrate que el disco Zonis está en contacto con la piel.

## Pedidos de Zonis®

- 19 mm diámetro / 2 mm apertura x 10 discos por caja
- 25 mm diámetro / 4 mm apertura x 10 discos por caja
- 37.5 mm diámetro / 7 mm apertura x 10 discos por caja




19mm diameter/  
2mm opening

Ref. pedido: ZN19



25mm diameter/  
4mm opening

Ref. pedido: ZN25

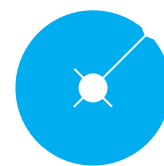

37.5mm diameter/  
7mm opening

Ref. pedido: ZN37

## Zonis: presentación

---



**Zonis** es un nuevo apósito antimicrobiano diseñado para ser colocado alrededor del acceso de entrada de dispositivos intravenosos (DIV) vasculares y no vasculares. Compuesto por espuma de poliuretano, sobre una capa de iones de plata / matriz de alginato cálcico, **Zonis** esta disponible en tres tamaños para acomodar una amplia lista de catéteres que incluyen catéter periférico, catéter central, catéter arterial y catéter umbilical.

**Zonis** está diseñado para reducir las infecciones locales relacionadas con catéter (IRC) y la colonización dermatológica de microorganismos comúnmente relacionados con IRC. Esto se consigue suministrando iones de plata directamente y de forma segura al orificio de entrada del catéter.